

Leukomed® I.V

Apósito transparente adhesivo semioclusivo para fijación.

Descripción

Apósito transparente adhesivo, semioclusivo especialmente diseñado para fijación de vías venosas. Consiste en un apósito de poliuretano transparente con un adhesivo de poliacrilato.

El adhesivo está completamente recubierto con papel blanco siliconado y por una lámina de aplicación superior con una banda roja que facilita su uso, minimizando la formación de pliegues en el apósito y se debe retirar desde la banda roja al finalizar la colocación.

Características

- Tamaño de 4.5 cms x 4.5 cms.
- Semipermeable: permeable al vapor de agua y oxígeno e impermeable ante contaminantes externos.
- Transparente: Permite inspección visual en cualquier momento.
- Resistente al agua.
- Flexible, se adapta bien a los contornos.
- Bien tolerado por todo tipo de piel.
- Radiotransparente.
- Buen poder adhesivo, sin ser agresivo.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.

Esterilización

- Óxido de etileno.

Almacenamiento

- En lugar seco, mantener alejado de la luz y el calor.

Recomendaciones de uso

- Para la fijación de vías venosas periféricas pediátricas.
- Aplicar en la zona elegida, fijando todos los bordes con firmeza, y al final, retirar la película superior desde la banda roja.
- Para prevención de lesiones de piel, como apósito primario.
- Para fijación de apósito, como apósito secundario.

Composición

- Sustrato película de Poliuretano (Peso 18 + 2g\m2)
- Adhesivo de Poliacrilato (Peso 28 + 3g\m2)

Procedencia Certificaciones de calidad

Alemania

ISO 13485 / CE

Presentaciones Leukomed I.V.


Código	Descripción	Unidad de Venta
72390-00004	4.5cm x 4.5cm	Caja x 50 Unidades




Leukomed[®] I.V

Apósito transparente adhesivo semioclusivo para fijación.


Paso a Paso para una correcta aplicación de Leukomed[®] I.V.

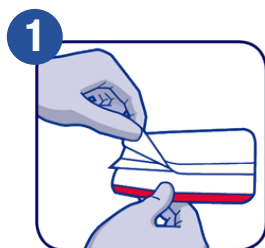


1 Remueva una lámina del papel protector posterior.

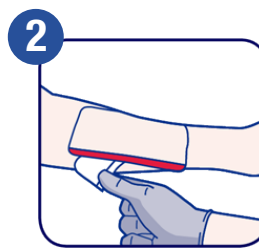

2 Aplique en la zona elegida, asegúrese que la piel se encuentre limpia y seca. Remueva el resto del papel.

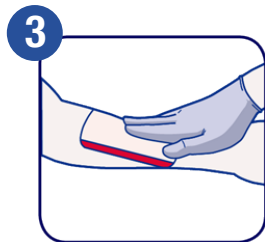

3 Alise la película con la yema de los dedos, especialmente por los bordes para su completa fijación.

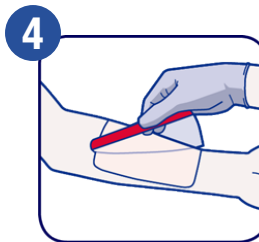

4 Retire la lámina transparente superior, comenzando por la banda roja de fácil aplicación e un solo movimiento.