

# Ficha Técnica

## Barrera NATURA® Flexible

Placa cutánea plana recortable con disco Stomahesive y adhesivo microporoso, para sistema de 2 piezas Natura®.



**convatec**

— forever caring —

### BENEFICIOS

**Protección de la Piel:** Las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen capacidad de re - generar la piel irritada. La placa protectora de piel Stomahesive® se adhiere a la piel seca.

**Adhesión seco a Húmedo:** Absorben la humedad manteniendo la piel íntegra y protegida.

**Multimedidas:** Recortable y adaptable a diferentes tamaños de estoma.

**Discreción:** Borde adhesivo microporoso. Color piel para mayor discreción.



### Descripción

Placa recortable flexible de ostomía con disco de protección cutáneo hidrocoloide Stomahesive y con borde adhesivo microporoso flexible e hipoalergénico opaco, aro de acople central flexible para acople con bolsas Natura Recortable.

### Recomendaciones de uso

Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.

- Mida el estoma con la guía proporcionada. Limpie suavemente el área con agua y séquela suavemente, sin frotar.
- Limpiar la piel circundante con agua limpia y jabón suave.
- La piel periestomal debe estar libre de disolventes o sustancias grasosas se recomienda utilizar barrera protectora.
- Trace el tamaño del estoma en el papel blanco posterior, centrándose alrededor del orificio inicial.
- Ampliar el orificio de la placa protectora Stomahesive® recortándolo según el tamaño del estoma.
- Para su remoción plicar pasta Stomahesive® o polvo Stomahesive® según necesidad.

### Composición del producto

Barrera cutánea Stomahesive® : Constituida en su parte central por Carboxi- metil Celulosa Sódica, pectina, gelatina, poli-isobutileno con soporte adhesivo hipoalergénico.

Código ICC	Tamaños	Presentación
125263	38mm.	10 unidades
125264	45mm.	10 unidades
125265	57mm.	10 unidades
125266	70mm.	10 unidades

Fabricante: ConvaTec Inc. / ConvaTec  
Dominican Republic Inc.  
EEUU/República Dominicana