

Ficha Técnica

Barrera NATURA® Flexible

Placa cutánea plana recortable con disco Stomahesive y adhesivo microporoso, para sistema de 2 piezas Natura®.



convatec

— forever caring —

BENEFICIOS

Protección de la Piel: Las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen capacidad de re - generar la piel irritada. La placa protectora de piel Stomahesive® se adhiere a la piel seca.

Adhesión seco a Húmedo: Absorben la humedad manteniendo la piel íntegra y protegida.

Multimedidas: Recortable y adaptable a diferentes tamaños de estoma.

Discreción: Borde adhesivo microporoso. Color piel para mayor discreción.



Descripción

Placa recortable flexible de ostomía con disco de protección cutáneo hidrocoloide Stomahesive y con borde adhesivo microporoso flexible e hipoalergénico opaco, aro de acople central flexible para acople con bolsas Natura Recortable.

Recomendaciones de uso

Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.

- Mida el estoma con la guía proporcionada. Limpie suavemente el área con agua y séquela suavemente, sin frotar.
- Limpiar la piel circundante con agua limpia y jabón suave.
- La piel periestomal debe estar libre de disolventes o sustancias grasosas se recomienda utilizar barrera protectora.
- Trace el tamaño del estoma en el papel blanco posterior, centrándose alrededor del orificio inicial.
- Ampliar el orificio de la placa protectora Stomahesive® recortándolo según el tamaño del estoma.
- Para su remoción plicar pasta Stomahesive® o polvo Stomahesive® según necesidad.

Composición del producto

Barrera cutánea Stomahesive® : Constituida en su parte central por Carboxi- metil Celulosa Sódica, pectina, gelatina, poli-isobutileno con soporte adhesivo hipoalergénico.

Código ICC	Tamaños	Presentación
125263	38mm.	10 unidades
125264	45mm.	10 unidades
125265	57mm.	10 unidades
125266	70mm.	10 unidades

Fabricante: ConvaTec Inc. / ConvaTec
Dominican Republic Inc.
EEUU/República Dominicana