

# Ficha Técnica

## Bolsa NATURA® colectora de Ostomía opaca y transparente

Bolsa drenable opaca o transparente que se ensambla al sistema de 2 piezas Natura®



**convatec**  
— forever caring —

### BENEFICIOS

#### Protección de la Piel:

Las bolsas drenables para ostomías Natura están recubiertas con un panel de confort que impide el contacto del plástico con la piel del paciente, reduciendo la probabilidad de irritaciones. También están disponibles en presentaciones transparente y opaca, de acuerdo a la necesidad y preferencia del paciente.

#### Tecnología para el control de olores

Las bolsas drenables emplean un filtro diseñado específicamente para las necesidades de la persona que permite reducir los gases al interior de la bolsa, los olores y ayuda a mantener la bolsa con una apariencia más plana.

#### Sistema de cierre

El sistema de cierre sin pinza "InvisiClose" ofrece doble seguridad, facilidad de drenaje, comodidad y limpieza. El diseño de tiras es fácil de abrir y el drenaje más alargado permite un mejor control de flujo y reduce el riesgo de salpicaduras.



Fabricante: ConvaTec, Inc. – Estados Unidos de América  
ConvaTec Dominican Republic, Inc.  
República Dominicana

#### Descripción

Bolsa recolectora para uso en ostomías, con filtro de carbón que incluye una capa anti-obstrucciones, materiales amables con la piel, sistema de cierre "InvisiClose" y bolsillo de seguridad "Lock-it Pocket" que esconde de manera segura el drenaje de la bolsa, proporcionando el confort de una bolsa cerrada.

#### Recomendaciones de uso

Se recomienda consultar el instructivo de uso del sistema que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo.

- Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias grasosas o emolientes.
- Coloque primero la barrera cutánea siguiendo las instrucciones de uso correspondientes.
- Sostenga la pestaña de seguridad sobre la parte delantera de la bolsa
- Doble el drenaje de la bolsa 4 veces (cierre "InvisiClose") y asegúrese de que las pestañas de cierre se superpongan entre ellas.
- Presione las pestañas de cierre unas sobre otras hasta que estén aseguradas y cuando escuche el "clic" a lo largo del drenaje de la bolsa.
- Gire el bolsillo de seguridad sobre la parte posterior de la bolsa (cara hacia la piel) y presione el sistema de sellado hasta escuchar el "clic" que asegura que está completamente cerrado.

#### Composiciones del producto:

Lámina de la bolsa: etilvinil acetato / cloruro de polivinilideno (PVDC por sus siglas en inglés) y colorante (en bolsas opacas); panel de confort: fibra de polietileno / polietileno-tereftalato; sistema de cierre de la bolsa: tira de adhesivo de poliestireno, cinta de cierre de cremallera: cinta en polipropileno, adhesivo de caucho; pestaña: etilvinil acetato; filtro con membrana médica, protección del filtro en lámina de polietileno.

Código ICC	Medida	Presentación
416416	Aro 45 Transparente	10 unidades
416419	Aro 57 Transparente	10 unidades
416422	Aro 70 Transparente	10 unidades

Código ICC	Medida	Presentación
416415	Aro 38 Opaca	10 unidades
416417	Aro 45 Opaca	10 unidades
416420	Aro 57 Opaca	10 unidades
416423	Aro 70 Opaca	10 unidades